


veštačko osemenjavanje svinja



# **RAZREĐIVAČI SEMENA NERASTA**

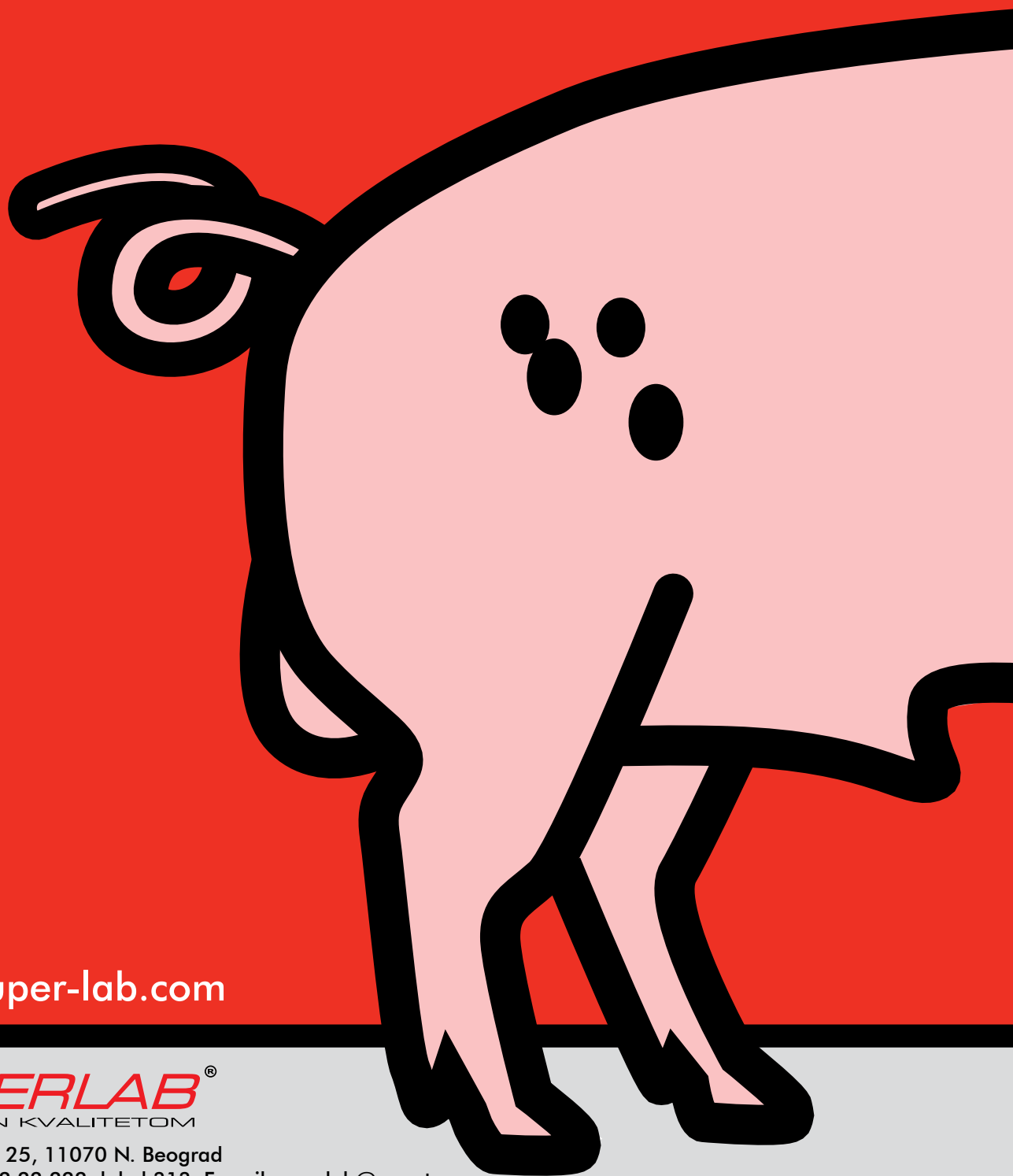

[www.super-lab.com](http://www.super-lab.com)

**SUPERLAB**<sup>®</sup>  
INSPIRISAN KVALITETOM

M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd  
Tel./Fax: 011 22 22 222, lokal 313, E-mail: [superlab@eunet.rs](mailto:superlab@eunet.rs)

## RAZREĐIVAČI SEMENA NERASTA



### Tehničke karakteristike

#### Slobodne od B.S.A.

Magapor razređivači ne sadrže derivate animalnih proteina (Slobodni od Goveđih Serum Albumina) zbog prevencije prenosa potencijalnih patogena.

Magapor razređivači sadrže kombinaciju antibiotika, u skladu sa **Evropskom Direktivom 90/429/EEC**, koja omogućava razmenu semenih doza između različitih zemalja.

Kombinacija antibiotika pokriva širok spektar bakterija, dajući veću zaštitu spermatozoidima.

Aluminijsko pakovanje omogućava pogodniju konzervaciju i izolaciju sadržaja.

### Potvrda kvaliteta

Magapor je priznat od strane ANEOR-a u skladu sa međunarodnim standardom Kvaliteta Poslovanja **UNE-EN-ISO 9001:2000** za dizajn, razvoj, proizvodnju, distribuciju i prodaju razređivača-konzervanasa za životinje, prvenstveno za svinje.

#### Potpuna sledljivost:

- Magapor primenjuje interne kontrole i inspekcije tokom svih faza proizvodnje i skladištenja
- Magapor primenjuje standardne procedure rada da bi se izbegle greške bilo koje vrste
- Magapor vodi računa o potvrdi kontrole na svim razređivačima pre puštanja na tržište da bi obezbedili njihovu garanciju
- Svaki sirovinski materijal koji se koristi u proizvodnji Magapor razređivača ima garanciju farmaceutske i prehrambene industrije.

### Prateća uputstva

**Uslovi skladištenja:** Neotvorena pakovanja treba skladištiti na hladnom i suvom mestu, van dometa svetlosnih zraka.

**Uputstvo za upotrebu:** Da bi dobili optimalan osmolaritet, preporučujemo razređivanje sadržaja uz konstantno mešanje (do kompletnog razređenja) u 1 litru destilovane vode ili vode II tipa kvaliteta na 37 °C



Istraživanje + Razvoj + Inovacije



Impuls za konstantno istraživanje i unapređivanje razređivača podstiče biotehnoški sektor Magapora.

Magapor učestvuje u **EUREKA** i **CDTI** istraživačkim projektima, kao i u saradnji sa španskim i međunarodnim univerzitetima.

**VELIKO ISKUSTVO U RAZVOJU I PROIZVODNJI RAZREĐIVAČA !**



### JEDINSTVENI PROIZVOD NA SVETSKOM TRŽIŠTU !

**DICOL** – Razređivač proizveden za redukciju bakterijske kontaminacije prilikom kolekcije sperme, pre samog rastvaranja sa uobičajenim razređivačem.

Sadrži šest tipova antibiotika odabranih na osnovu dejstva na bakterije, najčešće uzročnike kontaminacije nerastovskog semena.




#### Dostupnost

Pakovanja od 1l, 5l i 100l.

#### Međunarodno prisustvo


Proizvedeno u Španiji od strane Magapor SL.  
Predstavništva Magapora i široka mreža distributera nalaze se širom sveta.



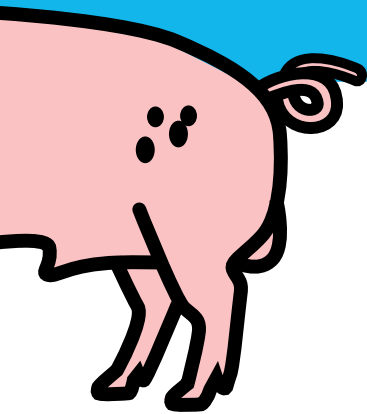

**BIO PIG**

Razređivač nerastovskog semena baziran na dokazanoj BTS inicialnoj formuli.

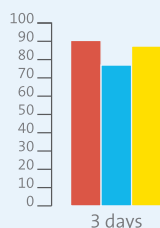

**Pokretljivost**


**SHOST**

**SORT**




**OPTIM-I.A.**

Razređivač optimalne održivosti nerastovskog semena.

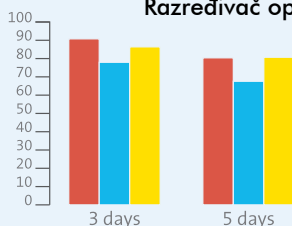


**VITASEM LD**

Razređivač dugotrajne održivosti nerastovskog semena.

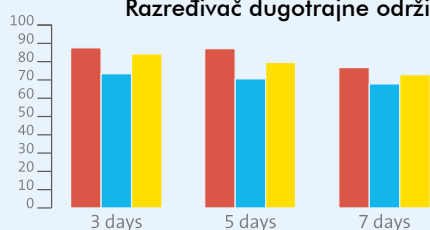

**DURAGEN**

Ekstra dugotrajni razređivač nerastovskog semena. Formula koja zadovoljava najzahtevnije potrebe čuvanja semena.

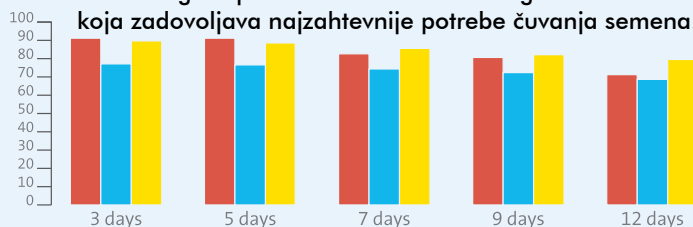

Test konzervacije sproveden na istom ejakulatu koji predstavlja njegove osnovne karakteristike u momentu uzimanja:

Pokretljivost 90%  
SHOST\* 78%  
SORT\* 88%

\*SHOST: Hipoosmotski test  
\*SORT: Test osmotske otpornosti



[www.super-lab.com](http://www.super-lab.com)

**SUPERLAB**<sup>®</sup>  
INSPIRISAN KVALITETOM

Milutina Milankovića 25, 11070 N. Beograd

Tel./Fax: 011 22 22 222, lokal 313, E-mail: [superlab@eunet.rs](mailto:superlab@eunet.rs)